

Bedienungsanleitung zur identyMe Anwendung

QR Code scannen oder über www.identyME.app zur Anwendung gelangen

Registrierung

1. Bei erster Nutzung auf die Schaltfläche „Registrierung“ klicken und die erforderlichen Angaben eingeben.
 - a. Land* und Telefonnummer*:
Deutschland findet man in der Auswahl unter „Germany“
2. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine E-Mail oder SMS zur Bestätigung der Registrierung. **Bitte auch den Spam Ordner überprüfen, falls keine E-Mail angekommen ist.**
3. Nach der Bestätigung können Sie über die Schaltfläche „Anmelden“ zur Anwendung gelangen.

Anmeldung

Im Rahmen der 2-Wege Identifizierung erhalten Sie nach der erfolgreichen Anmeldung mit E-Mail und Kennwort einen Code per SMS. Diesen bitte in das entsprechende Feld eingeben.

Identitätsnachweis

1. Verifizieren der Identität
2. Ausweisdokument und Ausstellerland auswählen
3. Foto der Vorder- und Rückseite machen und hochladen
4. Gesichtsscan durchführen, dazu die Bedingungen von Yoti lesen und bestätigen.

Testvorbereitung

1. Klicken Sie auf „Mache einen Test“
2. Testkit auswählen: **NOVEL Coronavirus 2019-nCoV Antigentest. (Collodial Gold)**
3. Testkit auspacken, Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des Tests lesen, QR-Code des identyME Vouchers auf die freie Fläche der Testkassette kleben (den HOTGEN Schriftzug überkleben) -> Test starten

4. Sie werden jetzt aufgefordert ein Bild des QR-Codes auf der Testkassette zu machen. **Die gesamte Testkassette muss sichtbar sein!** Nach erfolgreichem Bild auf die Schaltfläche „Jetzt starten!“ klicken.

Testdurchführung

1. Führen Sie den Test durch und klicken auf „Start“, folgen Sie den Anweisungen in dem Video, welches Sie durch den gesamten Testprozess begleitet, dabei filmt und überwacht. Drücken Sie nach jedem durchgeführten Schritt auf den Button „weiter“. Zum Schluss tropfen Sie 4 Tropfen der Flüssigkeit in das Feld, welches mit einem Tropfen gekennzeichnet ist. Dies bestätigen Sie erneut über die entsprechende Schaltfläche. Jetzt läuft der 15 Minuten Timer bis zum Ablesen des Ergebnisses.
2. Nach Ablauf des Timers werden Sie automatisch auf die Seite zum Einlesen Ihres Tests weitergeleitet.
3. Bitte machen Sie nun wieder ein Bild Ihrer kompletten Testkassette in dem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
4. Jetzt erhalten Sie umgehend Ihr Testergebnis in der Anzeige der Anwendung. Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit Ihres Tests. Klicken Sie auf „Zertifikat“, um Ihr offizielles Zertifikat online zu erhalten.
5. Ausgehend von einer 24-Stunden Gültigkeitsdauer wird Ihnen nun in der Anwendung die Restlaufzeit Ihres durchgeführten Tests angezeigt.

Erhalt des Zertifikats

Klicken Sie rechts neben der verbleibenden Gültigkeitsdauer auf „Anzeigen“, danach auf der Seite auf „Download als PDF“. Das Zertifikat wird Ihnen nun angezeigt und kann gespeichert werden.